

Návod na použití zadýmovacího aplikátoru:

Směs léčiva které budete používat dobře protřepejte a nalijte do malé lahvičky. Zapalte hořák a počkejte, až chromová trubice zčervená.

Možné důvody proč aplikátor nefunguje:

Emulze nevytéká: odšroubujte šroub na malé lahvičce, vyjměte kuličku a pružinu a vše očistěte a poté vložte zpět.

Hořák nehoří, nevydává plyn: odšroubujte šroub na hliníkové části, která drží ochrannou síť. Vytáhněte síť dopředu. Odšroubujte hořák a poté malou mosaznou trysku. Vyfoukejte trysku, dokud nebudou otvory čisté. Vraťte vše na své místo a pokračujte v práci.

Údržba aplikátoru:

Po práci, (když aplikátor vychladne!) nalijte do prázdné malé lahvičky čistý alkohol (96%), pořádně protřepejte a nekolikrát prostríkněte aplikátorem, aby se trubička pročistila.